

**ENTRETIEN DU MASQUE BARRIERE TISSU****Complément notice d'utilisation masque barrière tissu – V.1-29-03-2020**

- 1) A la livraison, faire un nœud aux 4 extrémités des liens d'attache pour éviter tout effilochement.



- 2) A chaque enlèvement du masque barrière souillé pour être lavé, faire un nœud avec les 4 liens d'attache pour éviter tout emmêlement des liens.

Mettre son masque barrière dans le sac à linge à votre disposition.

Le sac à linge à votre disposition ne possède pas d'attache, il sert de contenant pour les masques souillés. Ce sac à linge est à laver en même temps que vos masques souillés, les masques barrière sortiront de ce sac pour assurer leur lavage mécanique optimal à 60°C puis séchage tambour si vous en disposez.

Le masque doit être parfaitement sec à la sortie du séchage tambour.



**ATTENTION...**

si cette opération n'est pas réalisée,  
vous encourez l'emmêlement des liens,  
et vous ne pourrez plus les dénouer...

